

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）


鼻しっとりジェル

【警告】

- ・鼻の炎症のひどい時は使用を避けてください。
- ・使用中に何らかの異常があった時には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・耳や鼻に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・鼻が充分にかめない方は使用できません。*
- ・お子様が使用される際は保護者の指導の下で使用してください。*

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

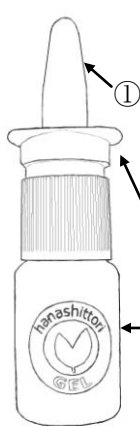

- ①ノズル
先端より米粒大（約0.05ml）の
ジェルが噴出
- ②スプレー（ポンプ）
指を引っ掛け下に押す事により
ジェルが噴出
- ③ボトル（10ml）
ジェル状の洗浄液が10ml 充填
されている
- ④キャップ
ノズル部分を清潔に保つ為の保
護キャップ

2. 原理**

ポンプを下に押す事により米粒大（0.05ml）のジェルがノズル先端より噴出される

3. 成分**

精製水・スペアミント・L-メントール・ジェル基材

【使用目的又は効果】**

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】**

- ①初めて使用される時はスプレーを数回空押ししてジェルが出たのを確認してから使用して下さい。*
- ②ノズル先端を浅く鼻腔に入れ左右1～2回ずつゆっくりスプレーして下さい。*
- ③鼻を2～3回つまみジェルを鼻腔内に広げて下さい。
- ④ティッシュや綿棒などで軽く拭き取して下さい。
（よりしっとり感を得たい時は拭き取らずに使用して下さい）
- ⑤使用後はノズルをきれいに拭き、キャップを閉めて下さい。
※ジェルを綿棒などにとって鼻腔内に塗って頂く事も可能です。
※お子様や妊娠中の方でも使用して頂けます。

【使用上の注意】

- ・ノズル・綿棒を鼻の奥まで入れないで下さい。
- ・鼻が詰まるような感じの時は鼻をかんで下さい。
- ・ノズルは鼻の奥まで入れず、入り口付近でゆっくりスプレーして下さい。（鼻の奥までジェルが届くと一時的に鼻詰まりを起こす為）
- ・本品は鼻腔以外には使用しないで下さい。
- ・本人以外には使用しないで下さい。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。**
- ・洗浄液が無くなったなら器具は廃棄して下さい。詰替はできません。*

【保管方法及び有効期間等】**

直射日光の当たる所、高温多湿の所を避けて保管して下さい。

標準的な使用期間：約1ヶ月（1日3回使用した場合）
使用期限：5年〔自己認証による〕*

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後はノズルをティッシュなどで拭き取り、キャップを閉めて清潔に保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番 2-10-7
電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番 2-10-7
電話番号：03-3792-2460

【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土 日 祝日を除く）

取扱説明書を必ず参照してください