

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）


ぐ〜クリーン EX

【警告】

- ・鼻の炎症のひどい時は使用を避けてください。
- ・使用中に何らかの異常があった時には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・耳や鼻に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。*
- ・鼻が充分にかめない方は使用できません。*
- ・お子様が使用される際は保護者の指導の下で使用してください。*

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

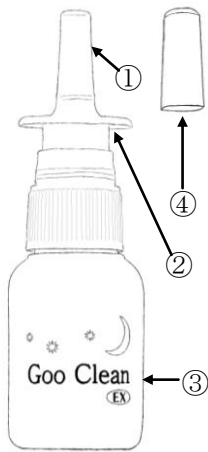

- ①ノズル
先端よりミスト状（約0.1ml）の
洗浄液が噴出
- ②スプレー（ポンプ）
指を引っ掛け下に押す事により
洗浄液が噴出
- ③ボトル（30ml）
洗浄液が30ml充填されている
- ④キャップ
ノズル部分を清潔に保つ為の保
護キャップ

2. 原理**

ポンプを下に押す事により1回約0.1mlの洗浄液がノズル先端より噴出される

3. 成分

精製水・塩化ナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム・グリセリン・香料・パラベン

【使用目的又は効果】**

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】**

○初めて使用される際はキャップを外し、スプレーを数回空押しして洗浄液が出たのを確認してから使用してください。

①キャップを外し、ノズル先端を軽く鼻腔に入れ、左右2～3回前後スプレーして鼻腔内を洗浄してください。

②洗浄後は軽く鼻をかみ、ノズルを清潔にし、キャップをはめて保管してください。

※洗浄液が鼻腔から流れ落ちるので、ティッシュなどでおさえて使用してください。

※お子様や妊娠中の方でも使用して頂けます。**

【使用上の注意】

- ・ノズルを鼻の奥まで入れないでください。
- ・本品は鼻腔以外には使用しないでください。
- ・本人以外には使用しないでください。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。**
- ・洗浄液を使い切ったら器具は捨ててください。**

【保管方法及び有効期間等】**

直射日光や高温多湿の場所を避け、小児の手の届かないところに保管してください。

標準的な使用期間：約2ヶ月（1日1回使用した場合）

使用期限：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】

- ・洗浄後は軽く鼻をかみ、ノズルを清潔にし、キャップをはめて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土 日 祝日を除く）

取扱説明書を必ず参照してください