

2017年 9月1日改訂（第5版）\*\*

届出番号：13B3X00355000003

2016年12月1日改訂（第4版）\*

## 器55医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

## ハナクリーンS

## 【禁忌・禁止】\*

- ・洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるため鼻が充分にかめない方は使用しないでください。\*
- ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるため使用しないでください。\*
- ・鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・耳に痛み(圧力)を感じる時は水圧を弱めにしてください。また改善しない時は使用を中止してください\*
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。

## ◎お子様が使用される際

- ・保護者の指導の下で使用してください。
- ・鼻を充分にかめないお子様は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時、鼻づまりのひどい時は使用しないでください。
- ・鼻や耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。

## 【形状、構造及び原理等】\*


## 1. 構成

本体



- ・材質：\*  
カバーキャップ・ノズル・ボトル  
キャップ・ボール：ポリプロピレン  
ボトル・ジョイント：ポリエチレン  
弁・Oリング・ホース：シリコンゴム  
液晶温度計：PET  
重り：真鍮
- ・本体寸法：W60×D43×H145mm
- ・本体重量：40g

## 構造図\*\*

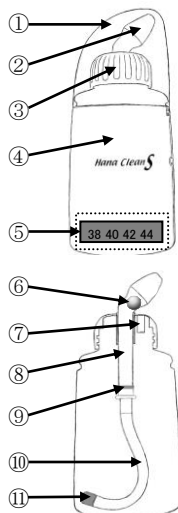


- ①カバーキャップ
- ②ノズル
- ③ボトルキャップ
- ④ボトル（容量 150ml）
- ⑤液晶温度計（ボトル裏面）
- ⑥ボール
- ⑦弁
- ⑧ジョイント
- ⑨Oリング
- ⑩ホース
- ⑪重り

## 2. 原理\*

- ・ボトルに150mlの洗浄液を入れてボトルの中心部分を押し事によりノズル先端の穴から水流が出る。
- ・ボトルを押し力により水圧の調節が可能。

## 3. 付属品

## 《サーレス(10包入)》

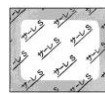

- ・洗浄液の濃度を調節する為に1回分(150ml)に1包を入れて使用する。
- ・成分：塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

## 《ポーチ》



- ・本体とサーレスを収納する袋

## 【使用目的又は効果】

鼻腔内の洗浄

## 【使用方法等】\*\*

## 《準備》

本体をよく洗い、器具内部を通水してから使用してください。\*\*

## ①お湯を入れる\*\*

ボトルキャップを左に回して上部を取り外します。ボトル側面のHライン(150ml)まで給湯器で約40℃のお湯を入れます。  
※給湯器を使用しない場合はCのラインまで水を入れて、Hのラインまで熱湯を注ぎ足すと約40℃になります。

## ②温度の確認\*\*

ボトルの裏面にある温度計で適温(約40℃)であることを確認します。  
※熱いと感じる場合は38℃位で使用してください。

## ③洗浄剤を入れる\*\*

付属の「サーレス」を1包入れてよく溶かします。

## ④本体上部のセット\*\*

ノズルを上まで完全に引き上げ、上部をボトルに戻してボトルキャップを締めます。

## 《使用方法》

洗面所や浴室などで行うか、受け皿を用意してください。

## ⑤洗浄の姿勢

ノズルを鼻腔に垂直になるよう軽く鼻にあて、前かがみになります。

## ⑥洗浄する

「エー」と発声しながらボトル中心部を押して鼻を洗浄します。

3プッシュずつ両鼻を交互に洗浄液がなくなるまで続けてください。\*

※洗浄に慣れるまでは水圧を強くかけないでください。

※洗浄液は150mlすべて使い切るのが効果的ですが、残った場合必ず捨ててください。\*

⑦鼻をかむ

洗浄後は鼻を片方ずつやさしくかんで、鼻に残った洗浄液を出して終了です。

※洗浄後しばらくして鼻の奥に残った洗浄液が出てくることがありますが問題はなりません。頭を前後に振ったり軽くジャンプすると出やすくなります。

⑧洗浄後は本体のお手入れをしてください。

(取扱説明書「お手入れ編」を参照)

【使用上の注意】\*

①使用前の注意

- ・熱湯を扱う際はやけどに気を付けてください。
- ・洗浄液の温度は40～42℃の範囲で使用してください(44℃以上の場合はやけどをする可能性があります)。
- ・洗浄する際は必ず付属のサーレスを使用してください(洗浄液の濃度を調節し、鼻粘膜への刺激を減らす為)。
- ・原則として本人以外は使用しないでください。本人以外が使用する場合はノズルを十分に洗浄し、消毒を行ってから使用してください(感染症を予防する為)。
- ・洗浄は洗面所などで前かがみになり衣服を濡らさないように注意して行ってください。

②使用時の注意

- ・耳への圧力を軽減する為ノズルで鼻を完全に密閉しないでください。
- ・洗浄液が気管に入るのを防ぎ耳への圧力を軽減させる為、必ず「エー」と発声しながらボトルを押してください。
- ・洗浄液は1度で使い切り、残った場合は捨ててください。

③本体の扱いについての注意

- ・使用後は本体をよく洗い乾燥させてください。
- ・鼻洗浄以外には使用しないでください。
- ・水量メモリは目安です。水温に合わせて適宜調節してください(温度計は38～44℃以外では表示されません)。
- ・液晶温度計は水に濡れたままの状態や強くこすると剥れる場合がありますので注意してください。
- ・ノズル(ジョイント)を完全に上まで引き上げないとボトルキャップとの隙間から水が漏れる場合があります。
- ・破損の原因になるので煮沸や電子レンジの使用はやめてください。\*

【保管方法及び有効期間等】\*

◎長期間使用しない時\*

- ・本体はよく乾燥させてから、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ※水分が残っているとカビや錆などの原因になります。
- ・使用を再開する時は本体をよく水洗いしてから使用してください。また、弁が貼りついて開閉しないことがあるので、弁の開閉を確認してください。\*
- ・標準的な使用期間の目安  
ハナクリーンS本体：1年〔自己認証による〕  
サーレス：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】\*

◎使用後のお手入れ(毎回)

- ①ボトルに1/3位の水を入れ、ボトルを押して中に残った洗浄液を洗い出し、内部の水分が取り除けるまで空押しします。  
※カビや錆の発生を防ぐため必ず行ってください。
- ②ノズルをよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥してください。  
※表面の汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですすいでください。

◎消毒方法(月に1～2回)\*\*

各部品は水アカやカビの予防として、市販の塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)で月に1～2回つけ置き消毒してください。

A：上部一式

ホース先端の重りを外して消毒し、よく水ですすいでください。

B：ボトル

ボトルに消毒液を入れ、ボトル内部を消毒し、よく水ですすいでください。

※重りや温度計の破損防止の為、本体全体のつけ置き消毒はしないでください。

◎部品交換\*\*

ノズル・ジョイント・ホースの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回は《上部一式》の交換をお勧め致します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-5080

【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30 (土 日 祝日を除く)

使用方法・お手入れ方法の詳細については  
必ず取扱説明書をお読みください。