



お手入れのしかた

【使用後のお手入れ(毎回)】

- ①ボトルに1/3位の水を入れ、ボトルを押して中に残った洗浄液を洗い出し、内部の水分が取り除けるまで空押しします。
※カビや錆の発生を防ぐため必ず行ってください。
- ②ノズル部分をよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥してください。
※汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですすいでください。
※煮沸はできません。

【長期間使用しない時】

- 乾燥させてから、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※水分が残っているとカビや錆などの原因になります。
- 使用を再開する時は一度水を通し全体をよく水洗いしてから使用してください。また、弁が貼りついて開閉しないことがあるので、弁の開閉を確認してください。(※裏面 図1参照)

消毒方法について

【衛生的にお使い頂くために】


- ノズル・ジョイント・ホース・ボトルの内部は洗うことが難しいため、水アカやカビの予防として定期的(月に1~2回位)に消毒をしてください。
- 消毒薬は、市販の塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)をお使い頂き、消毒後はよく水洗いしてください。
※使用方法は消毒薬の取扱説明書をご確認ください。

☆上部一式は重りをはずしてつけ置きしてください(重りの腐食防止のため)。
☆ボトルは消毒薬をボトルの中に入れてつけ置きし、内部のみを消毒してください(温度計の破損防止のため)。
☆破損防止のため、煮沸はしないでください。

部品交換について

ハナクリーンSはすべての部品が購入頂けます。
ご注文方法については裏面をご確認ください。

部品表 (8%税込価格)

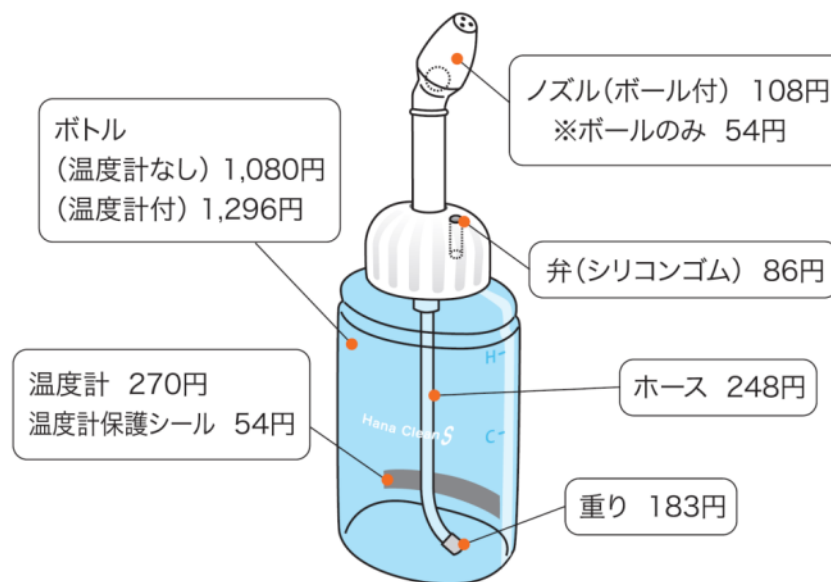

1年に1回は部品交換をしましょう



上部一式
1,620円


ノズル・ジョイント・ホースについては水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れをして頂き1年に1回は《上部一式》の交換をお勧め致します。

※上記以外の部品についてはホームページまたは弊社までお問い合わせください。

故障かな?と思ったら


症状	原因	対策
ボトルを押した後元に戻らない(戻りが悪い)	弁のフタの貼りつき? ボトルキャップの締め過ぎ?	ボトルキャップ裏側の弁が貼りついて作動していない可能性があります。フタの開閉確認をしてください(図1参照)。改善しない場合はボトルキャップの締め方を少し緩めにする と空気が入りやすくなり改善します。
空気穴から水が漏れる	弁の紛失や破損?	ボトルキャップ裏側の弁の紛失、弁のフタの破損、又は外れかけている可能性があります。弁を取り外してフタの開閉確認をして取り付け直してください(図1参照)。弁がない場合はお問い合わせください。
温度計が表示されない	水温が適応範囲外?	水温が38℃以下の可能性があります。温度計は38～44℃以外の時は反応しません。水温が低い季節に水量メモリを使って温度設定をする場合は、水を少なくお湯を多めに して適宜調節してください。
ノズルとボトルキャップの間から水が漏れる	ノズルが上まで引き上がっていない? ボトルキャップの締め方が緩い?	ノズルが一番上まで引き上がっていない可能性があります。ホースの根元のストッパーまでしっかりとノズルを引き上げて ください(図2参照)。改善しない場合はボトルキャップの締め方が緩い可能性がある ので少し強く締めてください。

図1 弁の開閉確認

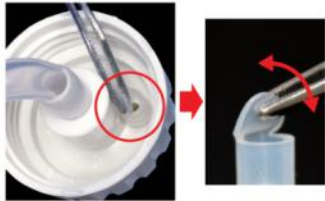

弁のフタは切れやすいので注意してください。

図2 しっかり引き上げる

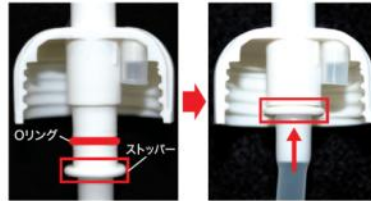

ストッパーまで上げるとリングが水漏れを防ぎます。

別売品・アフターサービス

【洗 浄 剤】サーレス (50包入 税込1,350円)

【各 部 品 の 注 文】各 部 品 の 詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ の 「 購 入 方 法 」 を ご 確 認 の う え、
ホ ー ム ペ ー ジ ま た は お 電 話 に て ご 注 文 く だ さ い。

【問 い 合 わ せ】使 用 方 法 や 製 品 に つ い て の お 問 い 合 わ せ ・ 修 理 依 頼 は、
【修 理 依 頼】ホ ー ム ペ ー ジ ま た は お 電 話 に て ご 連 絡 く だ さ い。

株式会社 鼻ケアサポート

フリーダイヤル 0120-872-470

FAX 03-3792-1323

※受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

保証書

— 無料修理規定 —

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合は(株)ティー・ビー・ケーまで事前にご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の汚れ(カビ)、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 本書の提示がない場合。

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

お買い上げ日 年 月 日

販売店

(購入した際のレシート・納品書は保管しておいてください)

【発 売 者】株式会社 ティー・ビー・ケー

TEL 03-3792-5080

【製造販売元】株式会社 東京鼻科学研究所

FAX 03-3792-1323

E-mail tbk@hana-clean.com

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

URL <http://www.hana-clean.com>

