

2022年12月1日改訂(第6版)\*\*

届出番号：13B3X0035500001

2019年 9月1日改訂(第5版)\*

## 器55医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000(JMDNコード)

## ハナクリーンEX

## 【禁忌・禁止】

- ・洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるため鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるため使用しないでください。
- ・鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・耳に痛み(圧力)を感じる時は水圧を弱めにしてください。また改善しない時は使用を中止してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。


## ◎お子様が使用される際

- ・保護者の指導の下で使用してください。
- ・鼻を充分にかめないお子様は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時、鼻づまりのひどい時は使用しないでください。
- ・鼻や耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。

## 【形状、構造及び原理等】\*\*


## 1. 構成\*\*

## 本体

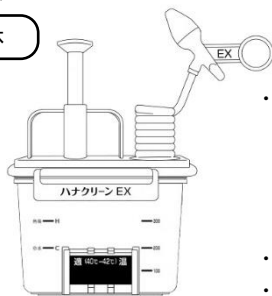


- ・材質：  
ポンプ本体・ノズル：ABS樹脂  
ボトル：AS樹脂  
ホース：ウレタン  
液晶温度計：PET
- ・本体寸法：W135×D74×H183mm
- ・本体重量：220g

## ポンプ

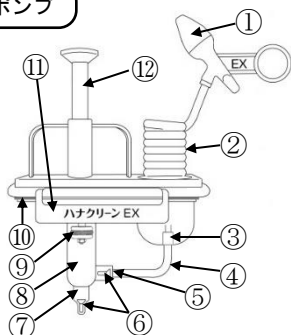

- ①ノズル
- ②コイルホース
- ③コイルホースジョイント
- ④L字ホース
- ⑤L字ホースジョイント
- ⑥弁
- ⑦パイプ先端
- ⑧パイプ
- ⑨Oリング
- ⑩フタパッキン
- ⑪フタ止め

## ボトル

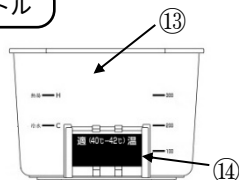

- ⑫ピストン(シャフト)
- ⑬ボトル(300ml)
- ⑭液晶温度計

## 2. 原理

ボトルに300mlの洗浄液を入れて本体のピストンを押す事によりノズル先端の穴から水流が出る。  
ピストンを押す力により水圧の調節が可能。

## 3. 付属品

## 《サーレMP(30包入)》



- ・洗浄液の濃度を調節する為に1回分(300ml)に1包を入れて使用する。
- ・成分：塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

## 《収納ケース》



- ・本体を収納するケース

## 【使用目的又は効果】

鼻腔内の洗浄

## 【使用方法等】\*\*

## 《準備する》\*\*

初めてお使いになる時は本体を中性洗剤でよく洗い、ポンプ内部を通水してください。

- ①ポンプをボトルから取り外します。  
給湯器(湯沸かし器)などで約40°Cのお湯を300mlラインまで注ぎます。  
※水温調節メモリを使う場合  
「C」まで水を入れ、「H」まで熱湯を注ぎ足します。
- ②ボトルの正面にある温度計で適温(約40°C)であることを確認します。  
※熱いと感じる場合は38°Cくらいで使用してください。
- ③付属の「サーレMP」を1包入れ、しっかりとかき混ぜます。
- ④ポンプをボトルに戻して、フタ止めでしっかり固定します。
- ⑤水流を選びます(購入時：シャワー)。  
・シャワー：鼻全体をやさしく洗いたいとき  
・ストレート：鼻の奥をしっかり洗いたいとき  
ストレート水流へ切り替える際はノズル先端を右に動かして引き上げ、左に動かしてください。  
※切替が固いときはゴム手袋を使ってください。

## 《洗浄する》\*\*

洗面所や浴室で行うか、洗面器を用意してください。  
洗浄液が出るまでピストンを数回押してください。

- ⑥ノズルを鼻にあて、前かがみになります。
- ⑦「エー」と発声しながらピストンを下まで押して洗浄します。  
左右の鼻を5プッシュずつ交互に洗浄液がなくなるまでくり返します。

## ＜洗浄後は＞\*\*

- ⑧鼻をかむ  
洗浄後は鼻を片方ずつやさしくかんで、鼻に残った洗浄液を出します。  
※耳の痛みや中耳炎の原因となるため、鼻は強くかまないでください。
- ⑨鼻に残った洗浄液の出し方  
約10秒真下を向き、そのまま約5秒ずつ左右を向きます。  
この動作を2～3回繰り返します。  
※洗浄液が鼻の奥に残ることがありますが、自然に排出されるので心配ありません。
- ⑩本体を洗ってください。

## 【使用上の注意】\*\*

### ①使用前の注意\*\*

- ・熱湯を扱う際はやけどに気を付けてください。
- ・洗浄液の温度は40～42℃の範囲で使用してください。(44℃以上の場合にはやけどをする可能性があります。)
- ・洗浄する際は必ず付属のサーレMPを使用してください(鼻粘膜への悪影響や本体の故障を防ぐため)。
- ・原則として本人以外は使用しないでください。  
本人以外が使用する場合は器具を洗浄し、消毒してください。  
また、必ずノズルを交換してください(感染症予防のため)。
- ・洗浄は洗面所などで前かがみになり衣服を濡らさないように注意して行ってください。

### ②使用時の注意\*\*

- ・水圧を強くしすぎると耳が痛くなることがあります。
- ・耳の痛みや気管に入ってむせないために必ず発声してください。
- ・洗浄液は一度で使い切り、残った場合は捨ててください。
- ・慣れるまでは弱めの水圧で洗浄してください。

### ③本体の扱いについての注意\*\*

- ・耐熱素材ではないので、熱湯につけたり煮沸はしないでください。電子レンジや食洗器も使用できません。
- ・温度計は38～44℃以外の時は反応しません。また、温度計は熱湯につけると破損するので注意してください。
- ・水が入った状態で本体を傾けるとポンプとボトルの間から水が漏れるので注意してください。

## 【保管方法及び有効期間等】\*\*

### ①長期間使用しない時\*\*

- ・本体はよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。  
※ホース内などに水分が残っているとカビやサビなどの原因になります。
- ・使用を再開する時は本体を洗い、必ず消毒してください。
- ・標準的な使用期間の目安  
ハナクリーンEX本体：5年〔自己認証による〕  
サーレMP：5年〔自己認証による〕

## 【保守・点検に係る事項】\*\*

### ①使用後のお手入れ(毎回)\*\*

- ①中性洗剤でノズルと全体を洗い、水でよく洗い流します。
- ②ボトルに1/3くらい水を入れ、ピストンを押して内部の洗浄液を洗い出し、水分が取り除けるまで空押しします。
- ③ポンプとボトルに分けて自然乾燥させます。

## ②消毒方法(月2回)\*\*

水垢やカビ予防のため、市販の逆性石鹼(ベンザルコニウム塩化物)でつけ置き消毒してください(つけ置き時間の目安は10分です)。

### ＜ポンプの各部品＞

本体から外した部品のみを消毒してください。

パイプはパイプ先端、L字ホースを外さずに消毒してください。

### ＜ボトル＞

ボトルから温度計を外して消毒してください。

※本体全体のつけ置き消毒・熱湯(煮沸)消毒はできません。

※部品が外せないときはゴム手袋を使うと滑りにくくなります。

## ③部品交換\*\*

ノズル・コイルホース・L字ホースは衛生上、1年に1回は交換してください。

※取扱説明書「お手入れ編」を参照してください。

## ④パイプ・Oリングのお手入れ(月1回)\*\*

ピストンの動作がスムーズになります。

- ①L字ホースの上側を外します。  
※L字ホースジョイントを外すと弁を紛失するおそれがあるので注意してください。
- ②パイプを左に止まるまで約45度回し下に引き抜きます。
- ③パイプ内部とOリング、シャフトを柔らかい布などで拭きます。
- ④米粒大の白色ワセリン(別売)を綿棒にとり、Oリングに薄く塗ります。  
※白色ワセリンを塗らないとピストンの動作が悪くなります。
- ⑤パイプを元の位置に挿し込み右に止まるまで回し、L字ホースをしっかりと取り付けます。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

### 製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所  
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7  
電話番号：03-3792-2460

### 製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所  
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7  
電話番号：03-3792-2460

### 発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー  
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7  
電話番号：03-3792-5080

## 【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 鼻ケアサポート

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-6407 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30(土 日 祝日を除く)

使用方法・お手入れ方法は取扱説明書もご覧ください  
また、詳細はホームページの動画で見られます。

