

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）


鼻しっとりジェル

【禁忌・禁止】**

- ・鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- ・鼻の炎症（鼻づまり等）のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・お子様を使用する際は保護者の指導の下で使用してください。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成**

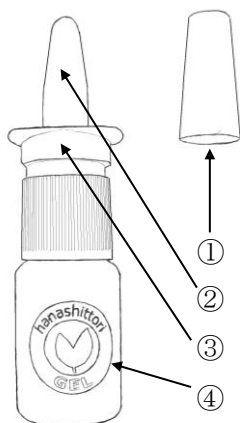

- ①保護キャップ
- ②ノズル
- ③スプレー（ポンプ）
- ④ボトル（10ml）

- ・材質：
スプレー：ポリプロピレン
ボトル・保護キャップ：ポリエチレン
- ・寸法：W26×D24×H94mm
- ・重量：20g

2. 原理*

スプレー（ポンプ）を下に押す事により1回約0.05mlの米粒大のジェルがノズル先端より噴出される。**

3. 成分

精製水・スペアミント・L-メントール・ジェル基材

4. 内容量**

10ml（約200プッシュ）

【使用目的又は効果】*

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】

- ①初めて使用する際はノズルの保護キャップを外し、ジェルが出るまでスプレーを10回くらい空押しします。**
- ②ノズル先端を軽く鼻に入れ、本体を立てた状態で左右1～2回ずつゆっくりスプレーを押して鼻腔内に注入します。**
※ジェルを綿棒につけてから鼻腔に塗ることもできます。
- ③鼻を2～3回つまんでジェルを鼻腔内全体に広げます。
- ④ティッシュや綿棒などで軽く拭き取ります。
※よりしっとり感を得たい時は拭き取らずに使用します。
- ⑤使用後はノズルを清潔にして保護キャップをはめて保管します。

【使用上の注意】

- ・ノズルや綿棒は鼻の奥まで入れず、ジェルは鼻の入り口付近に塗ってください（鼻の奥に塗ると鼻詰まりを起こす為）。
- ・鼻が詰まったり違和感がある時は、鼻をかむかティッシュなどでジェルを拭き取ってください。
- ・鼻腔以外には使用しないでください。
- ・本人以外には使用しないでください。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。*
- ・洗浄液が無くなったら器具は廃棄してください。
- ・本体が傾いた状態で使用するとジェルが出ないことがあるので注意してください。**

【保管方法及び有効期間等】*

- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・本体はなるべく立てて保管してください。横にしているとジェルが出にくくなります。**
- ・標準的な使用期間の目安：約1ヶ月（1日3回使用した場合）
- ・使用期限：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】**

- ・使用後はノズルを除菌製剤（消毒用アルコールなど）で拭き取り、キャップをはめて清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-5080

【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）