

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）


ぐ〜クリーン EX

【禁忌・禁止】**

- ・鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- ・鼻の炎症（鼻づまり等）のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・お様が使用する際は保護者の指導の下で使用してください。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成**

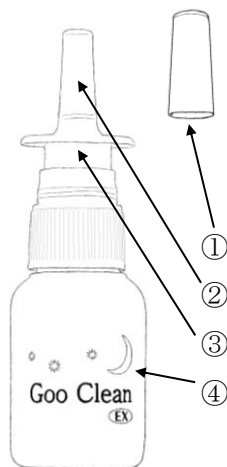

- ①保護キャップ
- ②ノズル
- ③スプレー（ポンプ）
- ④ボトル（30ml）

- ・材質：
スプレー：ポリプロピレン
スプレーボトル：ポリエチレン
保護キャップ：ポリスチレン
- ・寸法：W33×D33×H108mm
- ・重量：44g

2. 原理*

スプレー（ポンプ）を下に押す事により1回約0.1mlの洗浄液がノズル先端より噴出される。

3. 成分

精製水・塩化ナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム・グリセリン・香料・パラベン

4. 内容量**

30ml（約300プッシュ）

【使用目的又は効果】*

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】*

- ①初めて使用される際はノズルの保護キャップを外し、洗浄液が出るまでスプレーを5回くらい空押しします。
- ②ノズル先端を軽く鼻に入れ、左右2～3回前後スプレーして鼻腔内を洗浄します。
- ③洗浄後は軽く鼻をかみます。
- ④使用後はノズルを清潔にして保護キャップをはめて保管します。

【使用上の注意】

- ・使用する際は洗浄液が鼻腔から流れ落ちるのでご注意ください。
- ・ノズルを鼻の奥まで入れないでください。
- ・鼻腔以外には使用しないでください。
- ・本人以外には使用しないでください。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。*
- ・洗浄液が無くなったなら器具は廃棄してください。*

【保管方法及び有効期間等】*

- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・標準的な使用期間の目安：約2ヶ月（1日1回使用した場合）
- ・使用期限：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】**

- ・使用後はノズルを除菌剤（消毒用アルコールなど）で拭き取り、キャップをはめて清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-5080

【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）