

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

ハナぴゅあ（洗浄液 100ml 付）

【警告】

- ・鼻の炎症のひどい時は使用を避けてください。
- ・使用中に何らかの異常があった時には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・耳や鼻に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・鼻が充分にかめない方は使用できません。\*
- ・お子様が使用される際は保護者の指導の下で使用してください。\*

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

スプレー本体



- ①ノズル  
先端よりミスト状（約0.1ml）の洗浄液が噴出
- ②スプレー（ポンプ）  
指を引っ掛け下に押す事により洗浄液が噴出
- ③ボトル（20ml）  
洗浄液を20ml充填して使用する
- ④キャップ  
ノズル部分を清潔に保つ為の保護キャップ

洗浄液ボトル



- ⑤洗浄液ボトル  
洗浄液が100ml充填されている
- ⑥洗浄液ボトルキャップ  
洗浄液ボトル用ワンタッチキャップ

2. 原理\*\*

ポンプを下に押す事により1回約0.1mlの洗浄液がノズル先端より噴出される

3. 成分\*\*

精製水・塩化ナトリウム・グリセリン・ハッカ・ユーカリ

【使用目的又は効果】\*\*

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】\*\*

- ①初めて使用される時はスプレー本体からスプレー部分を回して取り外し、洗浄液を点線の位置まで注いで下さい。
- ②スプレー部分を元に戻し、しっかり回して締めて下さい。
- ③キャップを外し、洗浄液が出るまでスプレーを数回押しして下さい。
- ④ノズル先端を軽く鼻腔に入れ左右5回ずつスプレーして下さい。

⑤洗浄後は軽く鼻をかみ、ノズルを清潔にしてキャップをはめ、付属の収納袋に入れて保管して下さい。

⑥スプレー本体の洗浄液がなくなったら詰め替えて下さい。  
※お子様や妊娠中の方でも使用して頂けます。

【使用上の注意】

- ・洗浄液を注ぐ際はこぼさないよう注意して下さい。
- ・ノズルを鼻の奥まで入れないで下さい。
- ・本品は鼻腔以外には使用しないで下さい。
- ・本人以外には使用しないで下さい。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。\*\*
- ・洗浄液が無くなったら器具は廃棄して下さい。  
（洗浄液のみの別売りはございません）

【保管方法及び有効期間等】\*\*

直射日光の当たる所、高温多湿の所を避けて保管して下さい。

標準的な使用期間：約1ヶ月（1日3回使用した場合）

使用期限：5年〔自己認証による〕\*

【保守・点検に係る事項】

使用後はノズルをティッシュなどで拭き取り、キャップをはめて清潔に保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土 日 祝日を除く）

取扱説明書を必ず参照してください