

## 器55医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）


### ハナびゅあ（洗浄液100ml付）

#### 【禁忌・禁止】\*\*

- ・鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- ・鼻の炎症（鼻づまり等）のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・お子様が使用する際は保護者の指導の下で使用してください。

#### 【形状、構造及び原理等】

##### 1. 構成\*\*

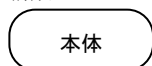


本体



- ①保護キャップ
- ②ノズル
- ③スプレー（ポンプ）
- ④スプレーボトル（20ml）

- ・材質：  
スプレー：ポリプロピレン  
スプレーボトル：ポリエチレン  
保護キャップ：ポリスチレン
- ・寸法：W28×D27×H110mm
- ・重量：12g

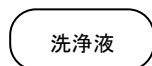

洗浄液



- ①ボトルキャップ
- ②洗浄液ボトル（100ml）

- ・材質：  
ボトルキャップ：ポリプロピレン  
洗浄液ボトル：ポリエチレン
- ・寸法：W48×D32×H120mm
- ・重量：119g

##### 2. 原理\*

スプレー（ポンプ）を下に押す事により1回約0.1mlの洗浄液がノズル先端より噴出される。

##### 3. 成分

精製水・塩化ナトリウム・グリセリン・ハッカ・ユーカリ

##### 4. 内容量\*\*

100ml（約1000プッシュ）

#### 【使用目的又は効果】\*

鼻腔内の洗浄

#### 【使用方法等】\*

- ①初めて使用する際は本体のスプレーを左に回して取り外し、洗浄液を本体裏面の点線の位置（約20ml）まで注ぎます。

②スプレーを本体に戻してしっかり締めます。

③ノズルの保護キャップを外し、洗浄液が出るまでスプレーを5回くらい空押しします。

④ノズル先端を軽く鼻に入れ、左右5回くらいスプレーして鼻腔内を洗浄します。

⑤洗浄後は軽く鼻をかみます。

⑥使用後はノズルを清潔にして保護キャップをはめて保管します。

※本体の洗浄液がなくなったら付属の洗浄液を詰め替えて使用してください。

※洗浄液の別売りはありません。

#### 【使用上の注意】

- ・使用する際は洗浄液が鼻腔から流れ落ちるのでご注意ください。
- ・ノズルを鼻の奥まで入れないでください。
- ・鼻腔以外には使用しないでください。
- ・本人以外には使用しないでください。（感染症を予防する為）
- ・使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。\*
- ・洗浄液が無くなったら器具は廃棄してください。

#### 【保管方法及び有効期間等】\*

- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・標準的な使用期間の目安：約1ヶ月（1日3回使用した場合）
- ・使用期限：5年〔自己認証による〕

#### 【保守・点検に係る事項】\*\*

- ・使用後はノズルを除菌製剤（消毒用アルコールなど）で拭き取り、キャップをはめて清潔に保管してください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-5080

#### 【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）