

2023年 1月1日改訂(第7版)**

届出番号：13B3X00355000003

2019年10月1日改訂(第6版)*

器55医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000(JMDNコード)

ハナクリーンS

【禁忌・禁止】**

- ・洗浄後に鼻をかむ必要があるため鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるため使用しないでください。
- ・鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・耳に痛み(圧力)を感じる時は水圧を弱めにしてください。また改善しない時は使用を中止してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。

◎お子様が使用される際

- ・保護者の指導の下で使用してください。
- ・鼻を充分にかめないお子様は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時、鼻づまりのひどい時は使用しないでください。
- ・鼻や耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。

【形状、構造及び原理等】**


1. 構成**

本体



- ・主な材質
上部：ポリエチレン・ポリプロピレン
ボトル：ポリエチレン
ホース：シリコンゴム
重り：真鍮(めっき処理)
- ・本体寸法：W60×D43×H145mm
- ・本体重量：40g

構造図

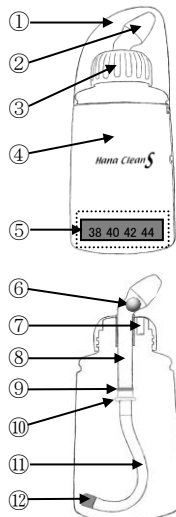

- ①カバーキャップ
- ②ノズル
- ③ボトルキャップ
- ④ボトル(容量150ml)
- ⑤液晶温度計(ボトル裏面)
- ⑥ボール
- ⑦弁
- ⑧ジョイント
- ⑨Oリング
- ⑩ストッパー
- ⑪ホース
- ⑫重り

2. 原理**

ボトルに150mlの洗浄液を入れてボトルの中心部分を押し事によりノズル先端の3つの穴から水流が出る。ボトルを押し力により水圧の調節が可能。

3. 付属品

《サーレス(10包入)》



- ・洗浄液の濃度を調節する為に1回分(150ml)に1包を入れて使用する。
- ・成分：塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

【使用目的又は効果】

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】**

《準備する》**

初めて使用する時は本体を中性洗剤でよく洗い、内部を通水してください(弁の破損に注意)。

- ①上部をボトルから取り外します。給湯器(湯沸かし器)などで、約40℃のお湯をHラインまで注ぎます。
※水温調節メモリを使う場合
①Cまで水を入れます。
②Hまで熱湯を注ぎ足します。
- ②ボトルの裏面にある温度計で、適温(約40℃)であることを確認します。
※熱いと感じる場合は38℃くらいで使用してください。
- ③付属の「サーレス」を1包入れ、上下にしっかりとかき混ぜます。
- ④ノズルをストッパーにあたるまで引き上げて固定します。
ストッパーまで引き上げることでOリングが水漏れを防ぎます。
- ⑤上部をボトルに戻してボトルキャップを締めます。

《洗浄する》**

洗面所や浴室で行うか、洗面器を用意してください。

- ⑥ボトルの中心を持ちます。
ノズルの先端が真上になるようボトルを約45度に傾けます。
ノズルを鼻にあて、前にかがみます。
- ⑦「エー」と発声しながらボトルを半分くらい押しして洗浄します。
左右の鼻を3プッシュずつ交互に洗浄液が無くなるまでくり返します。

＜洗浄後は＞**

⑧鼻をかむ

洗浄後は鼻を片方ずつやさしくかんで、鼻に残った洗浄液を出します。

※耳の痛みや中耳炎の原因となるため、鼻は強くかまないでください。

⑨鼻に残った洗浄液の出し方

約10秒真下を向きます。

そのまま約5秒ずつ左右を向きます。

この動作を2～3回繰り返します。

※洗浄液が鼻の奥に残ることがありますが、自然に排出されるので心配ありません。

⑩本体を洗ってください。

【使用上の注意】**

①使用前の注意**

- ・熱湯を扱う際はやけどに気を付けてください。
- ・洗浄液の温度が44℃以上の場合はやけどをする可能性があるので注意してください。
- ・洗浄する際は必ず付属のサーレスを使用してください(鼻粘膜への悪影響や本体の故障を防ぐため)。
- ・原則として本人以外は使用しないでください。本人以外が使用する場合は器具を洗浄し、消毒してください(感染症予防のため)。
- ・洗浄は洗面所などで前かがみになり衣服を濡らさないように注意して行ってください。

②使用時の注意**

- ・鼻粘膜を傷つけるのでノズルを鼻の奥まで入れないでください。
- ・水圧を強くしすぎると耳が痛くなるので注意してください。
- ・耳の痛みや気管に入ってむせないために必ず発声してください。
- ・洗浄液は一度で使い切り、残った場合は捨ててください。
- ・慣れるまでは弱めの水圧で洗浄してください。

③本体の扱いについての注意**

- ・耐熱素材ではないので、熱湯につけたり煮沸はしないでください。電子レンジや食洗器も使用できません。
- ・温度計は38～44℃以外では表示されません。また、熱湯につけると破損するので注意してください。
- ・水が入った状態で本体を傾けたり振ったりすると水が漏れるので注意してください。
- ・ノズル(ジョイント)をストッパーにあたるまで引き上げないと水漏れや水圧低下の原因となるので注意してください。
- ・弁のフタを引っ張ると破損するので注意してください。
- ・ノズルを外す際にはボールを紛失しないよう注意してください。

【保管方法及び有効期間等】**

④長期間使用しない時**

- ・本体をよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※ホース内などに水分が残っているとカビやサビの原因になります。
- ・使用を再開する時は本体を洗い、必ず消毒してください。
- ・標準的な使用期間の目安
ハナクリーンS本体：1年〔自己認証による〕
サーレス：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】**

⑤使用後のお手入れ(毎回)**

- ①中性洗剤でノズルと全体を洗い、水でよく洗い流します。
- ②ボトルに1/3くらい水を入れ、ボトルを押して内部の洗浄液を洗い出し、水分が取り除けるまで空押しします。
- ③上部とボトルに分けて自然乾燥させます。

⑥消毒方法(月2回)**

水垢やカビ予防のため、市販の塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)でつけ置き消毒してください(つけ置き時間の目安は30分です)。

＜上部一式＞

重りを外し、上部を完全に沈めて消毒してください。

※各部品を外すと細部まで効果的に消毒できます。

※重りは腐食防止のため、消毒しないでください。

＜ボトル＞

ボトル内に消毒液を注ぎ、内側を消毒してください。

外側は温度計の破損防止のため、つけ置きしないでください。

※本体全体のつけ置き消毒・熱湯(煮沸)消毒はできません。

⑦部品交換**

ノズル・ジョイント・ホースの内部はカビの心配があるので、1年に1回＜上部一式＞を交換してください。

※取扱説明書「お手入れ編」を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー

住所：東京都目黒区鷹番2-10-7

電話番号：03-3792-5080

【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 鼻ケアサポート

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7

TEL 03-3792-6407 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30(土 日 祝日を除く)

使用方法・お手入れ方法は取扱説明書もご覧ください。

また、詳細はホームページの動画で見られます。

