

あなたはどちらのハナクリーン？

S
エス



ハンディ
タイプ

1回
150ml

ハナクリーンS

α
アルファ



本格
タイプ

1回
300ml

ハナクリーンα

150ml

1回150mlの水量で
手軽な鼻洗浄

洗浄液
容量

300ml

1回300mlの水量で
しっかり鼻洗浄

ボディプッシュ式

柔らかいボトルで
簡単に調節

水圧
調節

ピストンポンプ式

誰でも使いやすく
快適に調節

約1年～2年

上部とボトルの交換で
長期的に使用可能

耐用
年数

約3年～5年

部品交換ができて
長期的に使用可能



鼻炎
かぜ

手軽な洗浄に

オススメ
ポイント



副鼻腔炎
後鼻漏

毎日の本格洗浄に

2022.1

毎日の習慣に
自鼻洗浄
してみよう!

鼻のトラブルに



お鼻
スッキリ!



★ お問い合わせ ★
株式会社 東京鼻科学研究所 (TBK)
0120-82-5080
9:00～17:30 (土・日・祝日を除く)

★ ホームページ ★
詳しい動画公開中!

ハナクリーン




ハナクリーンのすべてがわかる!

鼻洗浄とは？

なぜ鼻洗浄するの？

- ①鼻粘膜に付着した花粉・ウイルス・細菌を洗い流す
- ②鼻水・かさぶたを洗い流す
- ③鼻がスッキリ気分爽快になる

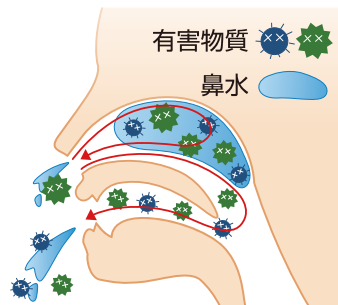

有害物質を早めに洗い流すことが大切！

なぜハナグリーンがいの？

温度 温度計・水量メモリでやさしい温度	濃度 洗浄剤サーレで痛くない濃度	水圧 快適3本シャワーと調節自在な水圧
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

つーんとしない3条件を適切に調節！

こんな時にオススメ！

 花粉症 慢性鼻炎	 鼻の手術後 のケア	 副鼻腔炎 後鼻漏	 風邪などの 感染症
-----------------	------------------	-----------------	------------------

毎日の健康管理に鼻洗浄をしましょう！

よくある質問

Q 鼻洗浄って痛くないですか？

A ハナクリーンは鼻洗浄の条件である『温度・濃度・水圧』を適切に調節できるので“つーん”としない鼻洗浄が行えます。

Q 正しい鼻洗浄の方法は？

A 耳鼻科で行う鼻洗浄が安全で効果的な方法です。洗面所などで前かがみになり「エー」と発声*しながら適切な水圧で洗浄します。*耳への圧力を軽減し、洗浄液が気管に入ることを防ぎます。

Q 鼻に入った洗浄液はどこから出るの？

A 【①洗浄液を入れた鼻孔 ②反対側の鼻孔 ③鼻の奥を通って口から】どこから出てきてもしっかり洗えています。*無理に口から出す必要はありません。

Q なぜ洗浄剤「サーレ」を使うの？

A 洗浄液の濃度を調節して“つーん”とする刺激や鼻粘膜への悪影響を防ぎます。またメントール・ペパーミント配合で爽やかな使用感です。

Q 1回150～300mlは多くないですか？

A 耳鼻科では1回150ml以上の洗浄液を使用しています。鼻の中をしっかりと洗うためにはこれ位の量は必要です。

Q 子供や妊娠中の人でも使えるの？

A 薬を使用しないので毎日使用しても安心です。ただし、鼻をかめない方は使用できません。