

パッケージ裏面

30ml

ぐ〜クリーン EX

心地よく眠るには？

鼻粘膜が乾燥すると口呼吸になり、
いびきや不眠の原因となります。
鼻粘膜を保湿して鼻呼吸をスムーズにし、
気持ち良い香りで気分をリラックスさせましょう。

使いかた

初めて使用する際はキャップを外し、スプレーを数回空押しして液体が出たのを確認してから使用してください。

- ① キャップを外し、ノズル先端を軽く鼻腔に入れ、左右2〜3回前後スプレーして鼻腔内を洗浄してください。(側面使用イメージ参照)
 - ② 洗浄後は軽く鼻をかみ、ノズルを清潔にし、キャップをはめて保管してください。
- ※ 洗浄液が鼻腔から流れ落ちるので、ティッシュなどでおさえて使用してください。
- ※ 医薬品ではないので、お子様・妊娠中の方も使用できます。

使用上の注意

- 鼻の炎症がひどい時は使用を避けてください。
- 使用中に何らかの異常があった時には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 耳や鼻に疾患のある方は医師に相談の上使用してください。
- お子様を使用する際は保護者の指導の下で使用してください。また、鼻が充分にかめない方は使用しないでください。
- 直射日光や高温多湿の場所を避け、小児の手の届かないところに保管し、開封後は3ヶ月以内に使用してください。
- 鼻以外には使用せず、必ずご本人のみ使用してください。
- 洗浄液を使い切ったら本体は捨ててください。
- この説明書は大切に保管し、よく読んでから使用してください。

[販売名] ぐ〜クリーンEX
[一般的名称] 手動式生体用洗浄器(一般医療機器)
[使用目的] 鼻腔内の洗浄
[内容成分] 精製水、塩化ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、香料、パラベン
[セット内容] 鼻洗浄スプレー(30ml)、収納袋
[医療機器製造販売届番号] 13B3X00355000010

[発売者]
(株)ティー・ビー・ケー
東京都目黒区鷹番2-10-7
TEL.03-3792-5080

[製造販売元]
(株)東京鼻科学研究所
東京都目黒区鷹番2-10-7

MADE IN JAPAN