

# パッケージ裏面

## <使い方>

- ① 初めて使用する際は本体のスプレーを左に回して取り外し、洗浄液を本体裏面の点線の位置(約20ml)まで注ぎます。
- ② スプレーを本体に戻してしっかり締めます。
- ③ ノズルの保護キャップを外し、洗浄液が出るまでスプレーを5回くらい空押しします。
- ④ ノズル先端を軽く鼻に入れ、左右5回くらいスプレーして鼻腔内を洗浄します。
- ⑤ 洗浄後は軽く鼻をかみます。
- ⑥ 使用後はノズルを清潔にして保護キャップをはめて保管します。



※ 本体の洗浄液がなくなったら付属の洗浄液を詰め替えて使用してください。

※ 洗浄液の別売りはありません。

## <使用上の注意>

●鼻が充分にかめない方は使用しないでください。●鼻の炎症のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。●使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。●お子様が使用する際は保護者の指導の下で使用してください。●高温多湿の所を避けて保管し、使用開始後は3ヶ月を目安に使い切ってください。●使用する際は洗浄液が鼻腔から流れ落ちるのでご注意ください。●この説明書は大切に保管し、よく読んでから使用してください。

ホームページ "<https://hana-clean.com>" にて使用方法動画や添付文書をご覧ください。

【販売名】 ハナビゅあ(洗浄液100ml付)  
【一般的名称】 手動式生体用洗浄器(一般医療機器)  
【使用目的】 鼻腔内の洗浄  
【セット内容】 本体スプレー(20ml用)、洗浄液ボトル(100ml)  
【洗浄液成分】 精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、ハッカ、ユーカリ  
【医療機器製造販売届番号】 13B3X0035500009

【発売者】  
(株)ティー・ビー・ケー  
東京都目黒区鷹番2-10-7  
TEL.03-3792-5080

【製造販売元】  
(株)東京鼻科学研究所  
東京都目黒区鷹番2-10-7

MADE IN JAPAN