

## 快適な鼻洗浄を

サーレSは快適な鼻洗浄の条件の1つである**洗浄液の濃度**を適切に調節できます  
ハナクリーンSをお使いの際はサーレSを使用してください

ハナクリーンEX・αには1包3gのサーレMPのご用意があります

ハナクリーンS 専用洗浄剤

# サーレS

### 使用方法

- ハナクリーンSのボトルに入れた150mlの温水にサーレSを1包(1.5g)入れ、よく溶かして使用してください。  
※ハナクリーンSの使い方は本体の取扱説明書を参照してください。
- サーレSは薬ではないので、1日何回でも使用できます。
- ハナクリーンEX・αに使用する際は1回2包(3g)入れてください。



#### <使用上の注意>

●鼻粘膜に異常がある時は鼻洗浄をしないでください。●異常を感じた時は使用を中止して医師に相談してください。●開封したものは一度で使い切ってください。●サーレSを使用しないで鼻洗浄を行うと、刺激感だけでなく鼻粘膜に悪影響を及ぼす事があるので必ずサーレSを使用してください。

[内容成分] 塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント  
[内容量] 50包(1.5g×50包)  
[包装材質] アルミフィルム

[発 売 者] (株)ティー・ビー・ケー  
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7  
TEL 03-3792-5080

[製造販売元] (株)東京鼻科学研究所  
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7  
MADE IN JAPAN

## サーレSの特長

- 1 洗浄液を人間の体液と同じ浸透圧濃度にするので**つんとしません**
- 2 メントール・ペパーミントが入っているの**ですっきり爽やかな**使用感です
- 3 1回に1包の個包装なので**使い方が簡単で衛生的**です
- 4 薬ではないので**お子様・妊娠中の方**でも使用できます