



「お手入れ方法」
動画公開中!

ハナクリーン動画

検索




使用後のお手入れ(毎回)

- ①中性洗剤でノズルと全体を洗い、水でよく洗い流します。
- ②ボトルに1/3くらい水を入れ、ピストンを押して内部の洗浄液を洗い出し、水分が取り除けるまで空押しします。
- ③ポンプとボトルに分けて自然乾燥させます。
※熱湯(煮沸)消毒はできません。電子レンジや食洗器も使用できません。

パイプ・Oリングのお手入れ(月1回)

ピストンの動作がスムーズになります

- ①チューブの下側を上へ引いて外します。
※L型ジョイントが外れると弁を紛失するおそれがあるので注意してください。
- ②パイプを左に止まるまで約45度回し(②-1)下に引き抜きます(②-2)。
- ③パイプ内部とOリング、シャフトの汚れを柔らかい布などで拭きます。
※パイプ内部の清掃はブラシ(別売)が便利です。
- ④米粒大の白色ワセリン(別売)を綿棒にとり、Oリングに薄く塗ります。
※白色ワセリンを塗らないとピストンの動作が悪くなります。
※白色ワセリンは薬局でお求めいただくか、メーカーまでご連絡ください。

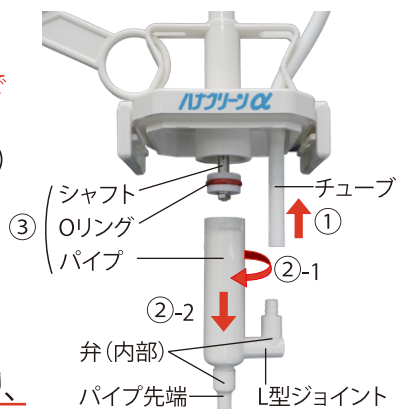

保管方法

- 本体をよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※ホース内などに水分が残っているとカビやサビの原因になります。
- 使用を再開する時は本体を洗い、必ず消毒してください。

消毒方法(月2回)

水垢やカビ予防のため、市販の塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)でつけ置き消毒してください(つけ置き時間の目安は約30分です)。

※各部位の取り外しや取り付け方法は動画を参照してください。

・ポンプの各部品

ポンプから外した部品のみを完全に沈めて消毒してください。
※パイプは先端、L型ジョイントを外さずに消毒してください。



・ボトル

温度計を外すと細部まで効果的に消毒できます。




※本体は熱湯(煮沸)消毒できません。またシャフトなどの金属部分はつけ置きできません。

部品注文

部品の詳細やご注文方法については、裏面の「別売品・アフターサービス」をご確認ください。

【1年に1回の交換部品】

・ノズルホース交換セット

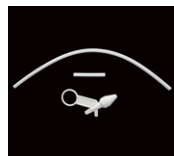

ノズル・ホースの内部はカビの心配があるので、**1年に1回**交換してください。

800円

【3年に1回の交換部品】

・パイプ交換セット(白色ワセリン付)



パイプ内部のカビや、Oリングの劣化による水圧低下の心配があるので、**3年に1回**交換してください。

1,000円

【器具の洗浄用ブラシ】



- ・ブラシ中 パイプ内部の清掃に
- ・ブラシ小 ホース・チューブの清掃に

各600円

☆ブラシセット(中+小)

中 小

セット割引 1,100円

・白色ワセリン



Oリングのお手入れに



100円

※価格は税込です

故障かな?と思ったら

【動画で詳しく見られます】

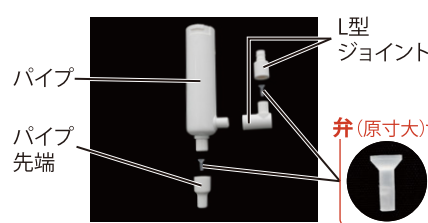

症状	原因と対策
ピストンの戻りが悪い	<p><u>パイプ内のOリングのワセリンが取れてピストンの動きが悪くなっている?</u></p> <p>パイプ・Oリングのお手入れをしてください。 ※裏面「パイプ・Oリングのお手入れ」参照</p>
・水が出ない ・水流が弱い ・ピストンが押しにくい	<p><u>パイプ先端とL型ジョイント内の弁のトラブル?</u></p> <p>パイプ先端とL型ジョイント内の弁を確認してください。 ※弁は小さいので紛失しないよう注意してください。</p>  <p><紛失していた場合> 弁を購入して取り付けてください。</p> <p><汚れていたり、貼り付いて(くい込んで)いた場合> 弁を清掃し、付け直してください。</p>
温度計が表示されない	<p><u>水温が38~44℃以外?</u></p> <p>特に冬期などは水温が38℃以下になっていると考えられるので、水温を高め調節してください。</p> <p><給湯器(湯沸かし器)を使う場合> 給湯器の設定温度を上げてください。</p> <p><水温調節メモリを使う場合> 水をCより少なめにして、熱湯の割合を多めにしてください。</p> 

別売品・アフターサービス

【洗浄剤サーレ】サーレMP60 (60包入 1,980円)
サーレMP180 (180包入 5,500円) ※価格は税込です

【各製品の注文】 メーカーからの直接販売となります。
部品単価表をご確認のうえ、ホームページ
またはお電話にてご注文ください。

<部品単価表>



【問い合わせ】 製品についてのお問い合わせ・修理依頼は、
ホームページまたはお電話にてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート

お問い合わせは
こちらから

フリーダイヤル **0120-872-470**

受付時間: 9:00~17:30 (土・日・祝日除く)

ホームページ <https://hana-clean.com>



保証書

— 無料修理規定 —

1. 取扱説明書・添付文書の注意に従った正常な使用で保証期間中に故障した場合は無料修理いたします。
2. 無料修理をご依頼になる場合は上記まで事前にご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、分解や改造による故障及び損傷
(ロ) 購入後の部品の紛失、汚れ(カビ)、落下等による故障及び損傷
(ハ) 本書の提示がない場合
4. 保証期間 お買い上げ日より1年

※購入時の領収書・納品書は保管しておいてください。

【製造販売元】 株式会社 東京鼻科学研究所
【発 売 者】 株式会社 ティー・ピー・ケー
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7
TEL 03-3792-5080

東京鼻科学研究所ホームページ

ハナクリーン

検索

