ハナクリーン動画





使用後のお手入れ(毎回)

- ①中性洗剤でノズルと全体を洗い、水でよく洗い流します。
- ②ボトルに1/3くらい水を入れ、ピストンを押して内部の洗浄液を 洗い出し、水分が取り除けるまで空押しします。
- ③ポンプとボトルに分けて自然乾燥させます。
- ※熱湯につけたり煮沸はできません。電子レンジや食洗器も使用できません。

パイプ・Oリングのお手入れ(月1回)

ピストンの動作がスムーズになります

- ①L字ホースの上側を外します。
 - ※外しにくいときはゴム手袋を使うと滑りにくくなります。 ※L字ホースジョイントを外すと弁を紛失するおそれがある ので注意してください。
- ②パイプを左に止まるまで約45度回し (②-1)下に引き抜きます(②-2)。
- ③パイプ内部とOリング、シャフトを 柔らかい布などで拭きます。
 - ※パイプ内部の清掃はブラシ(別売)が便利です。
- ④米粒大の<u>白色ワセリン(別売)を綿棒にとり、</u>パイプ先端へ Oリングに薄く塗ります。
 - ※白色ワセリンを塗らないとピストンの動作が悪くなります。 ※白色ワセリンは薬局でお求めいただくか、メーカーまで ご連絡ください。
- ⑤パイプを元の位置に挿し込み右に止まるまで 回し、L字ホースをしっかり取り付けます。





保管方法

- ○本体をよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。 ※ホース内などに水分が残っているとカビやサビの原因になります。
- ○使用を再開する時は本体を洗い、必ず消毒してください。

消毒方法(月2回)

水垢やカビ予防のため、市販の逆性石鹸(ベンザルコニウム塩化物)で つけ置き消毒してください(つけ置き時間の目安は約10分です)。

※各部品の取り外しや取り付け方法は動画を参照してください。

・ポンプの各部品

本体から外した部品のみを消毒してください。 パイプはパイプ先端、L字ホースを外さずに消毒してください。











ボトルから温度計を 外して消毒してください。



・ボトル



※本体全体のつけ置き消毒・熱湯(煮沸)消毒はしないでください。 ※部品が外しにくいときはゴム手袋を使うと滑りにくくなります。

部品販売

・交換用ノズル



複数名で 使用する時に

770円

・ブラシ中(パイプ用)



パイプ内部の 清掃に

600円

白色ワセリン



Oリングの お手入れに

100円

【1年に1回の交換部品】

ノズルホース交換セット



ノズル・ホースの内部は カビの心配があるので、

1.300円

【3年に1回の交換部品】

パイプ交換セット(白色ワセリン付)



パイプ内部のカビや、 Oリングの劣化による 水圧低下の心配があるので、 3年に1回交換してください。

1.000円

※価格は税込です

ご注文方法は裏面の「別売品・アフターサービス」をご確認ください。

故障かな?と思ったら

上 症状	原因と対策
ピストンの 戻りが悪い	Oリングのワセリンが取れてピストンの動きが悪くなって いると考えられます。 パイプ・Oリングのお手入れをしてください。
	※裏面「パイプ・0リングのお手入れ」参照
	パイプ先端とL字ホースジョイント内の弁のトラブルが 考えられます。
水が出ない	
水流が弱い	下図「パイプの構造」を参照のうえ、弁を確認してください。
ピストンが 押しにくい	<紛失していた場合> 弁を購入して取り付けてください。 <汚れていたり、貼り付いて(くい込んで)いた場合> 弁を清掃し、付け直してください。
温度計が表示されない	水温が38~44℃以外と考えられます。
	特に冬期などは水温が38℃以下になっていると考え られるので、水温を高めに調節してください。
	<給湯器(湯沸かし器)を使う場合> 給湯器の設定温度を上げてください。
	<水温調節メモリを使う場合> 水をCよりも少なめにして、熱湯の割合を多めに してください。

パイプの構造



パイプ先端・L字ホースジョイントを 外すときは弁の紛失に注意してください。

動画でチェック



<故障かな?と思ったら> 動画で詳しく見られます。

別売品・アフターサービス

【洗浄剤サーレ】 サーレMP60 (60包入 1,980円)サーレMP180 (180包入 5.500円) ※価格は税込です

【各部品の注文】 各部品の詳細はホームページの「購入方法」を参照のうえ、 ホームページまたはお電話にてご注文ください。

【問い合わせ】 使用方法や製品についてのお問い合わせ・修理依頼は、 【修理依頼】 ホームページまたはお電話にてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート

0120-872-470

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日除く)

ホームページ https://hana-clean.com

お問い合わせは こちらから



保証書

一無料修理規定一

- 1.取扱説明書・添付文書の注意に従った正常な使用で保証期間中に 故障した場合は無料修理いたします。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合は上記まで事前にご連絡ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、分解や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の汚れ(カビ)、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)本書の提示がない場合

保証期間 お買い上げ日より1年

お買い上げ日

年

月

 \Box

販売店

(購入した際のレシート・納品書は保管しておいてください)

[製造販売元] 株式会社 東京鼻科学研究所

「発売者」株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7 TEL 03-3792-5080 ホームページはこちら

ハナクリーン



