



お手入れのしかた

【使用後のお手入れ(毎回)】

- ①ボトルに1/3位の水を入れ、ボトルを押して中に残った洗浄液を洗い出し、内部の水分が取り除けるまで空押しします。
※カビや錆の発生を防ぐため必ず行ってください。
- ②ノズルをよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥してください。
※表面の汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですすいでください。
※煮沸はできません。

【長期間使用しない時】

- 本体はよく乾燥させてから、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※水分が残っているとカビや錆などの原因になります。
- 使用を再開する時は本体をよく水洗いしてから使用してください。
また、弁が貼りついて開閉しないことがあるので、弁の開閉を確認してください。(※裏面 図1参照)

消毒方法について

各部品は水アカやカビの予防として、市販の塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)で月に1~2回つけ置き消毒してください。

A: 上部一式

ホース先端の重りを外して消毒し、よく水ですすいでください。

B: ボトル

ボトルに消毒液を入れ、ボトル内部を消毒し、よく水ですすいでください。


※本体全体のつけ置き消毒・熱湯(煮沸)消毒はしないでください。

部品販売について

ご注文方法は裏面の「別売品・アフターサービス」をご確認ください。

部品表

※価格は10%税込価格です。

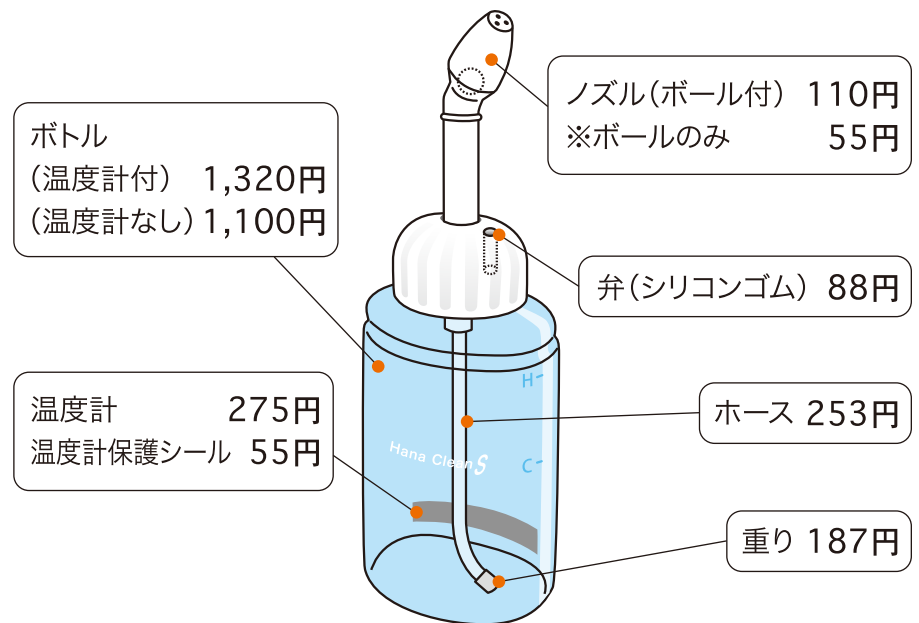

~1年に1回は部品交換をしましょう~



上部一式

1,650円

ノズル・ジョイント・ホースの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回は《上部一式》の交換をお勧め致します。

※上記以外の部品についてはホームページまたはお電話にてお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
ボトルを押した後に戻らない(戻りが悪い)	弁のフタの貼りつき? ボトルキャップの締め過ぎ?	ボトルキャップ裏側の弁のフタが貼りついて作動していないと考えられます。フタの開閉確認をしてください(図1)。改善しない場合はボトルキャップの締め方を少し緩めにするなど空気が入りやすくなり改善します。
空気穴から水が漏れる	弁の紛失や破損?	ボトルキャップ裏側の弁の紛失、弁のフタの破損と考えられます。弁を注文してください。※「別売品・アフターサービス」を参照。
温度計が表示されない	水温が適応範囲外?	水温が38℃以下と考えられます。温度計は38~44℃以外の時は反応しません。冬季など水温が低い季節に水量メモリを使って温度設定をする場合は、水の量を少なめにするなど適宜調節してください。
ノズルとボトルキャップの間から水が漏れる	ノズルが上まで引き上がっていない?	ノズルが一番上まで引き上がっていないと考えられます。ホースの根元のストッパーまでしっかりとノズルを引き上げてください(図2)。

図1 弁のフタの開閉確認




※弁は撮影用に着色しています。

◆ピンセットを用意します

- ①取り外す
弁を根元から上に押し上げて外します。
- ②開閉を確認する
弁のフタの開閉を確認します。
- ③取り付ける
突起部分に奥までしっかりと取り付けます。
※弁は破損しやすいので注意してください。

図2 ノズル引き上げ

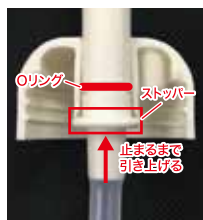

ノズルをストッパーが止まるまでしっかりと引き上げてください。Oリングが隙間を塞いで水漏れや水圧の低下を防止します。

別売品・アフターサービス

【洗 浄 剤】サーレS (50包入 1,375円) ※価格は10%税込価格です。

【各商品の注文】各商品の詳細はホームページの「購入方法」を参照のうえ、ホームページまたはお電話にてご注文ください。

【問 い 合 わ せ】使用方法や製品についてのお問い合わせ・修理依頼は、
【修 理 依 頼】ホームページまたはお電話にてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート

フリーダイヤル 0120-872-470

FAX 03-3792-1323

※受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

保証書

—無料修理規定—

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合は(株)ティー・ビー・ケーまで事前にご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の汚れ(カビ)、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 本書の提示がない場合。

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

お買い上げ日 年 月 日

販売店

(購入した際のレシート・納品書は保管しておいてください)

[発 売 者] 株式会社 ティー・ビー・ケー

[製造販売元] 株式会社 東京鼻科学研究所

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7
TEL 03-3792-5080

ホームページはこちら

ハナクリーン

検索

