



「お手入れ方法」
動画公開中!

ハナクリーン動画

検索



使用後のお手入れ(毎回)

- ①中性洗剤でノズルと全体を洗い、水でよく洗い流します。
- ②ボトルに1/3くらい水を入れ、ボトルを押して内部の洗浄液を洗い出し、水分が取り除けるまで空押しします。
- ③上部とボトルに分けて自然乾燥させます。

※熱湯(煮沸)消毒はできません。電子レンジや食洗器も使用できません。
※弁のフタ部分は切れやすいので、拭いたり外したり強い流水をかけないよう注意してください。

保管方法

- 本体をよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※内部に水分が残っているとカビやサビの原因になります。
- 使用を再開する時は本体を洗い、必ず消毒してください。


消毒方法(月2回)

水垢やカビ予防のため、市販の液体タイプ台所用漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で約30分つけ置き消毒してください。

※熱湯(煮沸)消毒はできません。電子レンジや食洗器も使用できません。
※詳しい消毒方法は動画を参照してください。

上部一式

重りを外し、上部を完全に沈めて消毒してください。
各部品を外すと細部まで効果的に消毒できます。
※弁は破損防止のため外したり触れたりしないでください。

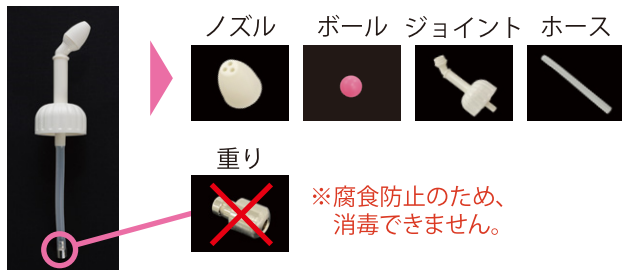

ボトル

ボトル内に消毒液を注ぎ、内側を消毒してください。



※温度計保護のため、全体をつけ置きしないでください。

部品注文

部品の詳細やご注文方法については、裏面の「別売品・アフターサービス」をご確認ください。

【1年に1回の交換部品】

上部一式



ノズル・ジョイント・ホースの内部はカビの心配があるので、1年に1回交換してください。

1,650円

【2年に1回の交換部品】

ボトル(温度計付)



ボトル内部のカビや劣化による破損の心配があるので、2年に1回交換してください。

1,320円

【器具の洗浄用ブラシ】



ブラシ大 ボトル内の清掃に
ブラシ小 ホース・ジョイント内の清掃に
各600円

☆ブラシセット(大+小)

セット割引 1,100円

<ブラシの使用イメージ>


ボトル(ブラシ大)



ホース(ブラシ小)




ジョイント(ブラシ小)

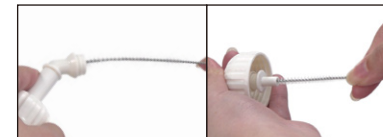

故障かな?と思ったら

【動画で詳しく見られます】



症状	原因と対策
ボトルの戻りが悪い	<p><u>弁がずれたり、弁のフタがくっついている?</u></p> <p>＜対策①＞ 弁を爪楊枝の先を使って根元から持ち上げるように外し、取り付け直します。 ※弁のフタを引っ張ると破損するので注意してください。</p>  <p>＜対策②＞ ボトルキャップ上面の空気穴から爪楊枝の丸い部分を押し込み、弁のフタを開閉させます。</p> 
空気穴から水が漏れる	<p><u>弁のフタが切れている、弁の紛失?</u></p> <p>フタ部分は切れやすいので注意</p>  <p>弁の状態を確認のうえ、新しい弁(88円)を購入して取り付けてください。</p>
ノズルとキャップの間から水が漏れる	<p><u>ノズルが一番上まで引き上がっていない?</u></p> <p>取扱説明書「使い方編」を参照のうえ、ノズルをストッパーまで引き上げてください。</p>
温度計が表示されない	<p><u>洗浄液の温度が38～44℃以外?</u></p> <p>特に冬期は38℃未満になっていると考えられるので、温度を高め調節してください。</p> <p>＜給湯器(湯沸かし器)を使う場合＞ 給湯器の設定温度を上げてください。</p> <p>＜水温調節メモリを使う場合＞ 水をCより少なめにして、熱湯の割合を多めにしてください。</p> 

別売品・アフターサービス

【洗浄剤サーレ】サーレS (50包入 1,375円) ※価格は税込です

<部品単価表>

【各製品の注文】 **メーカーからの直接販売となります。**
部品単価表をご確認のうえ、ホームページまたはお電話にてご注文ください。



【問い合わせ】製品についてのお問い合わせ・修理依頼は、
修理依頼 ホームページまたはお電話にてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート

お問い合わせはこちら

フリーダイヤル **0120-872-470**



受付時間: 9:00～17:30 (土・日・祝日除く)

ホームページ <https://hana-clean.com>

保証書

— 無料修理規定 —

- 取扱説明書・添付文書の注意に従った正常な使用で保証期間中に故障した場合は無料修理いたします。
- 無料修理をご依頼になる場合は上記まで事前にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、分解や改造による故障及び損傷
 - (ロ) 購入後の部品の紛失、汚れ(カビ)、落下等による故障及び損傷
※弁のフタ部分の破損や弁の紛失は保証対象になりません。
 - (ハ) 本書の提示がない場合
- 保証期間 お買い上げ日より半年
※購入時の領収書・納品書は保管しておいてください。

【製造販売元】株式会社 東京鼻科学研究所
【発売者】株式会社 ティー・ビー・ケー
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-10-7
TEL 03-3792-5080

東京鼻科学研究所ホームページ

ハナクリーン

検索

