



**【専用ブラシ】週1回の洗浄に**

パイプ・ホース・チューブの内部は水アカやカビの心配があります。ブラシを使った洗浄をお勧め致します。

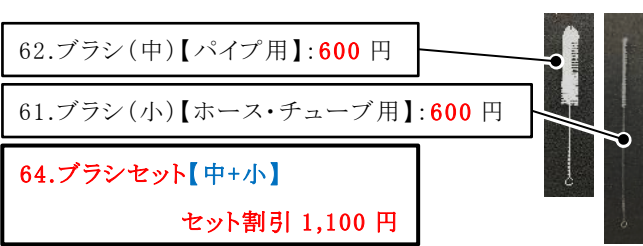

**【白色ワセリン】月1回のお手入れに**

パイプ・Oリングのお手入れを行うことでピストンの動作がスムーズになります。必ず《白色ワセリン》をお使いください。

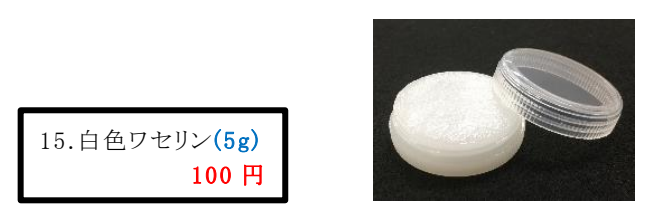


**【1年に1回の交換部品】**

ノズル・ホース・チューブの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回《ノズル・ホース交換セット》の交換をお勧め致します。



**【3年に1回の交換部品】**

パイプ内部やOリングは水アカやカビの他、劣化の心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、3年に1回《パイプ交換セット》の交換をお勧め致します。

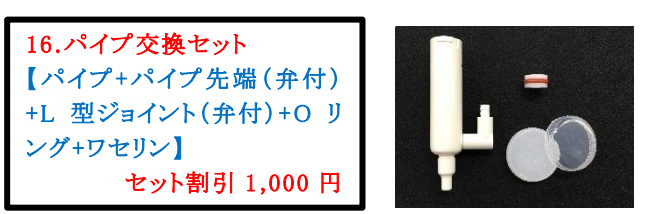

部品注文や修理依頼、使用方法や製品についてのお問い合わせ等は、お電話またはホームページ内のお問い合わせフォームにてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート **0120-872-470**

※受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://hana-clean.com>

